

# ノロウイルス検査キットの使用法

## ①検体提出袋の確認

(A)記載内容に修正がない場合→そのままご使用ください。

※本人以外の袋は使用できません。

(B)記載内容に修正がある場合

→修正箇所を赤ペン等で書き直してご使用ください。

※右図のように袋とシールの2か所の修正をお願いします。

(C)自身の氏名が印字されている袋がない場合

→氏名欄が未記入の袋に氏名を書いてご使用ください。

※中心部にある切り取り線は破かないでください。

※(B)と同様に2か所にハッキリと分かる文字で氏名を書いてください。

※未使用の袋は返却してください。



## ②便の採取

採便管は蓋部分が赤いノロウイルス専用をお使いください。(腸内細菌とは別の採便管です。)

便を適量採取し、蓋をしっかりと閉めてください。

※詳しい採取方法は検体用袋の裏面を参照してください。

## ③シールの貼付け

検体用袋の左側のシールを剥がし、採便管に巻きます。




※凸凹の下からQRコードが見えるように貼ってください。

## ④採便管を検体用袋に入れる

自身の検体用袋に採便管を入れ、封緘部のテープを剥ぎ、折り曲げ線を折り曲げてしっかり封をして下さい。

※1本のみ入れてください。

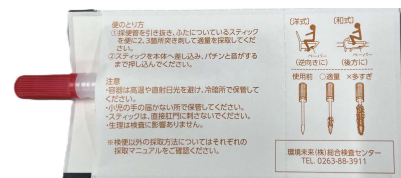

## ⑤検体送付書の記入

検体送付書に

お客様情報、送付日、検体数を必ず記入してください。

※検体数に相違が生じた場合はご連絡することがございます。

検体送付書 (提出用)

※以下の太枠内すべてに必要事項を記入してください。

|           |                   |              |    |
|-----------|-------------------|--------------|----|
| 企業名 (施設名) | 環境未来株式会社          |              |    |
| ご担当者      | 環境 太郎             |              |    |
| ご連絡先      | TEL               | 0263-88-3911 |    |
| 検体送付日     | 2025年1月25日        |              |    |
| 検体数       | 削除・未使用検体を除いてください。 | 10           | 検体 |

※記入検体数と到着検体数に相違があった場合、上記連絡先に連絡することになります。お間違えの無いようお願いします。

※未使用の容器・検体袋はご返却ください。

※本用紙でその他のご要望は対応いたしかねます。

環境未来株式会社 総合検査センター

## ⑥検体の提出

必ず検体と検体送付書を封筒等に同封の上、発送または回収担当者に提出してください。

※同一報告書にまとめる場合は、検体を分けずに送付してください。

分かれて到着した検体は報告書が分かれる場合があります。

※郵送の場合は必ず冷凍で指定をお願いいたします。



## 検体送付先

〒390-1242 長野県松本市和田4010-5 環境未来株式会社 総合検査センター